


# Regard® et Regard® UD

Solution d'entretien pour toutes les lentilles souples

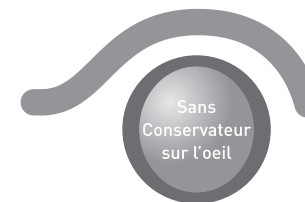

**Regard®** fait appel à une nouvelle technologie pour l'entretien des lentilles de contact.

Sa formule contient un décontaminant actif de nouvelle génération (Oxychlorite® system) qui se transforme dans l'œil en composants physiologiques des larmes (H<sub>2</sub>O et NaCl) et libère de l'oxygène.

Cette nouvelle formule est optimisée afin d'éviter l'utilisation de conservateurs habituels qui, lors d'un usage à long terme, peuvent induire des effets allergisants et toxiques.

**Regard®** nettoie, rince, désinfecte, conserve et lubrifie les lentilles de contact souples.

Sa formulation permet aussi de prévenir les dépôts protéiques.

## Composition :


**Regard®** est une solution stérile, isotonique et tamponnée contenant de l'eau purifiée, du chlorure de sodium, de l'acide borique, du poloxamer, de l'hydroxypropylméthylcellulose (0,15%), le complexe stabilisé Oxychlorite®.

## Mode d'emploi :

- Toujours se laver puis se sécher les mains avec soin avant de retirer ses lentilles.
- Verser quelques gouttes de **Regard®** sur les lentilles de contact et masser délicatement la surface pour les nettoyer.
- Rincer les lentilles avec **Regard®** pour éliminer les dépôts.
- Poser les lentilles dans l'étui et le remplir avec la solution de **Regard®**.
- Laisser les lentilles dans la solution pendant au moins 6 heures pour les décontaminer et éliminer les dépôts protéiques.
- **Regard®** détruit les micro-organismes.
- **Regard®** peut être utilisé pour hydrater et lubrifier les lentilles avant la pose.
- Rincer l'étui avec **Regard®** après chaque utilisation et le laisser sécher à l'air.

## Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser le produit si le flacon ou l'unidose sont endommagés.
- Utiliser de la solution **Regard®** neuve à chaque cycle de décontamination et jeter la solution après chaque usage.
- Éviter tout contact avec l'embout du flacon ou de l'unidose.
- Conserver le produit éloigné de toute source de chaleur et de la lumière du soleil.
- Flacon : après ouverture, la solution doit être utilisée dans les 90 jours (3 mois). Jeter toute solution restante après ce délai.
- Unidoses : ne jamais réutiliser l'unidose après ouverture, il existe un risque de contamination microbienne.
- Comme pour tous produits de ce type, arrêter l'utilisation en cas d'irritation ou d'allergie à l'un des composants et consulter un spécialiste.
- **TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.**
- Ne pas avaler.

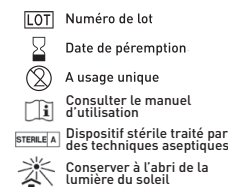

0318 Date du marquage CE : **Regard®** 08/04/2002 • **Regard® UD** 18/10/2010

**Regard®, Regard® UD** et Oxychlorite® sont des marques de Vita Research. Brevets USA et Européens en cours.

## Présentations :

**Flacon de 60 ml** - Code ACL : 34010 440 443-8 3

**Flacon de 355 ml** - Code ACL : 34010 791 304-0 2

**Pack de 3x355 ml** - Code ACL : 34010 540 271-4 7

**Boîte de 10 UD** - Code ACL : 34010 952 766-0 3

**Boîte de 30 UD** - Code ACL : 34010 952 767-7 1

**FABRICANT:**  
**Vita Research**

Via Variante di Cancelliera, 4  
00040 Ariccia (Rome) Italy



**DISTRIBUTEUR FRANCE :**  
**Horus Pharma**

148, av. G. Guynemer - Cap Var D2  
06700 Saint-Laurent du Var  
Tél. 04 93 19 54 03



C/REG011 - 01/13